

<b>PRODUCTO</b>	<b>EPS! Tapón CERA 12 ud.</b>	
<b>MODO DE EMPLEO</b>	Retirar el algodón envolvente, moldear la cera y colocar en la parte exterior del conducto auditivo.	
<b>PRECAUCIONES</b>	Este producto debe ser insertado, colocado y conservado siguiendo las instrucciones del fabricante. En caso de infección o perforación de tímpano, consulte con un médico antes de su utilización. Mantener fuera del alcance de los niños. No inserte el tapón muy profundamente ya que no podrá agarrarlo para su retirada. Contacte con el fabricante para más información.	
<b>CLASE DE PRODUCTO</b>	EPI	
<b>CÓDIGO NACIONAL</b>	202276.8	
<b>OTRAS INFORMACIONES</b>	REUTILIZABLES / LAVAR DESPUÉS DE CADA USO	

PROPIEDAD DE DEITERS - NO DISTRIBUIR