


<b>PRODUCTO</b>	<b>EPS! Tapón ESPUMA Talla S/L 6ud.</b>	
<b>MODO DE EMPLEO</b>	Los tapones se moldean y se colocan en los oídos. Tienen un largo tiempo de expansión, adaptándose perfectamente a la forma del conducto auditivo. La marca X en la parte posterior facilita su extracción.	
<b>PRECAUCIONES</b>	Este producto debe ser insertado, colocado y conservado siguiendo las instrucciones del fabricante. En caso de infección o perforación de tímpano, consulte con un médico antes de su utilización. Mantener fuera del alcance de los niños. No inserte el tapón muy profundamente ya que no podrá agarrarlo para su retirada. Contacte con el fabricante para más información.	
<b>CLASE DE PRODUCTO</b>	EPI	
<b>CÓDIGO NACIONAL</b>	S → 202278.2 / L → 202277.5	
<b>OTRAS INFORMACIONES</b>	NO REUTILIZABLES	

PROPIEDAD DE DEITERS - NO DISTRIBUIR