

PRODUCTO	WOPS' CONFORT OCULAR GOTAS HUMECTANTES CON AH SIN CONSERVANTES 10 ML	
TABLA NUTRICIONAL	No aplica.	
MODO DE EMPLEO	<p>Retire el precinto de seguridad del tapón antes de la primera utilización del producto. Retire el tapón. Presione con los dedos a ambos lados de la botella para que se forme una gota. Aplíquela directamente sobre el ojo o añádala sobre la lente de contacto. Después de su uso, coloque el tapón en la botella. Pasados 3 meses después de la primera apertura de la botella, deseche el producto.</p>	
PRECAUCIONES	<p>Conservar a temperatura entre 2 y 25 °C y evitar exposiciones prolongadas a la luz. Comprobar que el precinto del producto está intacto antes de su primera utilización. Una vez abierto el envase, consumir antes de 3 meses. Anote la fecha en que se abrió la botella por primera vez. Evitar tocar el gotero con los dedos y que no exista contacto con los ojos. En caso de irritación persistente, no continúe utilizando el producto y consulte a su profesional de la visión; podría ser alérgico a alguno de sus componentes. Manténgase fuera del alcance de los niños.</p>	
CLASE DE PRODUCTO	Producto sanitario.	
CÓDIGO NACIONAL	193597.7	
ALÉRGENOS	No aplica.	
OTRAS INFORMACIONES	WOPS' Gotas Humectantes con Ácido Hialurónico 10 ml proporcionan confort ocular inmediato.	