


PRODUCTO	WOPS' SOLUCIÓN ÚNICA	
TABLA NUTRICIONAL	No aplica.	
MODO DE EMPLEO	<p>1. Lávese bien las manos antes de manipular las lentes. 2. Quítese una de las lentes de contacto y aclárela durante unos segundos. 3. Añada suficiente cantidad de solución única en el estuche portalentes para que al incorporar la lente, ésta quede completamente sumergida en el líquido e introduzca la lente de contacto que acaba de aclarar. No es necesario frotar la lente de contacto. Hágalo sólo en el caso de que se lo recomiende su contactólogo. En este caso, añada dos o tres gotas de solución única sobre la lente y frótelas suavemente durante unos 20 segundos. 4. Quítese la otra lente de contacto y repita las mismas operaciones que con la primera. 5. Deje las lentes de contacto en el portalentes cerrado durante toda la noche o al menos durante seis horas para su correcta desinfección y limpieza. 6. Antes de ponerse las lentes de nuevo, aclárelas durante varios segundos con este producto.</p>	
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none"> • Utilice siempre solución única nueva. Deseche la solución sobrante del portalentes del día anterior • Mantenga el frasco bien cerrado cuando no lo esté usando y evite tocar con el gotero cualquier superficie • Compruebe que el precinto del producto está intacto antes de su primera utilización. Una vez abierto, consúmase antes de 90 días • Mantenga el producto fuera del alcance de los niños • Los pacientes alérgicos a alguno de los componentes del producto no deben utilizarlo • En caso de molestia persistente o irritación, extraiga las lentes, interrumpa el uso del producto y consulte a su contactólogo • Las lentes se pueden conservar un máximo de 30 días en el portalentes cerrado. 	
CLASE DE PRODUCTO	Producto sanitario.	
CÓDIGO NACIONAL	Frasco de 360 ml: 172966.8 / Duplo 2 x 360 ml: 172967.5 Frasco de 60 ml: 182206.2	
ALÉRGENOS	No aplica.	
OTRAS INFORMACIONES	Esta solución única elimina los depósitos de proteínas de las lentes de manera automática, no siendo necesaria hacer ninguna limpieza enzimática semanal. No obstante, si el grado de ensuciamiento de la lente de contacto es alto, puede ser necesario realizar una limpieza con comprimidos enzimáticos.	